



PROFESIONALŪS MEDICINOS PRODUKTAI

GYDYTOJO KĖDUTĖ

REF 1023AB2 (GIMA 45240 - 45241 - 45242 - 45245 - 45246)

Gamintojas / Gamintojas / Gamintojas / Gamintojas / Gamintojas / Gamintojas:
SILVERFOX CORPORATION LIMITED

Nr. 18, 1-asis TongLe kelias, TangXia miestas, Pengjiang rajonas, JiangMen miestas, Guangdong provincija, Kinija
amy.liang@silverfox.cn
Pagaminta Kinijoje

Importato da / Importavo / Importé par /Importado por / Importado por / Eingeführt von:
Gima SpA
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italija
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



1 APIE ŠĮ VADOVĄ Šis vadovas skirtas tik

šio konkretaus modelio veikimui paaiškinti. Jei vadovas bus naudojamas kitiems tikslams, mes neprisiimsime jokių atitinkamų pasekmių ir atsakomybės. Visa šio vadovo informacija yra saugoma autorių teisių ir negali būti kopijuojama ar verčiama jokia šios specifikacijos dalimi be raštiško gamintojo sutikimo.

2 ĮSPĖJIMAS

- Nestovėkite ant gaminio.
- Neleiskite vaikams žaisti su gaminiu.
- Nestatykite įrangos drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonios kambaryje, ir nelaikykite tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Nenaudokite šio gaminio tose vietose, kur dažote / purškiate dažus.

3 ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Operatoriai turėtų naudoti šį gaminį griežtai laikydamiesi instrukcijų ir išsaugoti šį vadovą ateičiai.
- Laikykites saugaus naudojimo procedūrų, neperkraukite. Įsitikinkite, kad gaminio komponentai produktai yra geros būklės, pašalinkite neigiamus veiksnius.
- Reguliariai priveržkite ratukus, atlošus ir sėdynę, kad išvengtumėte gedimų, kuriuos sukelia atsilaisvinę arba krintančios dalys.
- Šio gaminio negalima naudoti esant gedimams. Kai atsiranda neįprastų reiškinių ar garsų
Jei problema išspręsta, nedelsdami patikrinkite. Naudokite, kai problema išspręsta.
- Operatorius turėtų būti susipažinęs su atsargumo priemonėmis, aprašytomis kiekviename gaminio vadovo skyriuje, siekiant užtikrinti asmeninį ir gaminių saugumą.
- Įrangą pastatykite ant lygaus paviršiaus.
Jei ratukai pažeisti, prieš naudojimą juos pakeiskite.
- Po kiekvieno apdorojimo neutraliu reagentu pašalinkite dulkes ir dėmes nuo odos ir medienos.
- Pastatykite gaminį tinkamoje vietoje, atsižvelgiant į bendrą išplanavimą, dienos šviesą arba dirbtinį apšvietimą ir darbo aplinkos veikimo sąlygas. Laikykite jį švarioje, sausoje ir vėsioje aplinkoje.

4 SURINKIMAS IR NAUDOJIMAS


1. Pastatykite gaminį tinkamoje vietoje, atsižvelgiant į bendrą išplanavimą, dienos šviesą arba dirbtinį apšvietimą ir darbo aplinkos sąlygas. Laikykite jį švarioje, sausoje ir vėsioje aplinkoje.
2. Atidarykite pakavimo dėžę ir patikrinkite, ar lova nepažeista ir ar yra visi priedai ar atsarginės dalys. Kilus problemų, susisiekite su platintoju arba mumis.
3. Įrengimas

Šis gaminio paveikslėlis skirtas tik demonstravimui, konkrečią gaminio struktūrą žiūrėkite ant tikrojo gaminio.

5 TECHNINIAI PARAMETRAI

Šiame vadove pateiktos gaminio iliustracijos yra pagrįstos standartinio dujinio keltuvo konfigūracijos parametrais. Jei komplektuojamas kitas pasirinkamas dujinis keltuvas, parametrai priklauso nuo faktinio gaminio.

Nominali apkrova	170 kg
Pakuotės dydis	590x280x580
Grynasis svoris	7,5 kg
Bendras svoris	8,5 kg

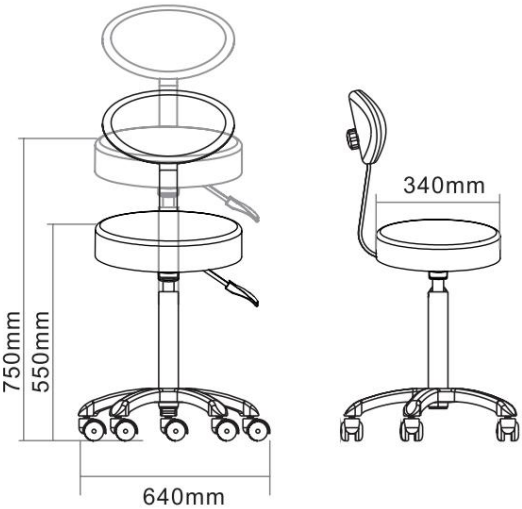

6 PRIEŽIŪRA Jei yra riebalų, nuvalykite paviršių švriu vandeniu ir neutraliu reagentu, o dulkes ir dėmes pašalinkite minkštu skudurėliu. Draudžiama naudoti alkoholį, stiprias rūgštis, stiprius šarmus ir kitus tirpiklius, kad išvengtumėte priešlaikinio plastikinių dalių susidėvėjimo.

7 GEDIMŲ ŠALINIMAS

NEVEIKIA TINKAMAI	1. Negaliu pakelti ar nuleisti kėdės.	1. Pakeiskite dujų keltuą.
	2. Ratukai negali sukstis ar judėti.	2. Pakeiskite ratuką.

Jei po aukščiau nurodytų veiksmų problema vis tiek neišsprendžiama, kreipkitės į techninės priežiūros centrą arba tiekėją, kad ją išspręstumėte.

GIMA GARANTIJOS SĄLYGOS
Taikoma standartinė 12 mėnesių „Gima“ B2B garantija.

